


بساطة الاستخدام في أربع خطوات سهلة!


ستسمعين صوت البول وهو ينساب في المرحاض عندما يعمل نظام "بيزي" بشكل صحيح وهذا شيء عادي.



2. ضعي "بيزي" بملاصقة جسدك واجلسي بشكل جيد على المرحاض. الفر في مثانتك بصورة طبيعية؛ ستسمعين صوت البول وهو ينساب في قلب المرحاض عند استخدام "بيزي" بشكل صحيح. وبعد الإنتهاء من التبول عدّي من واحد إلى 20 حتى يمكن لجهاز "بيزي" أن يفرغ محتوياته تماماً.

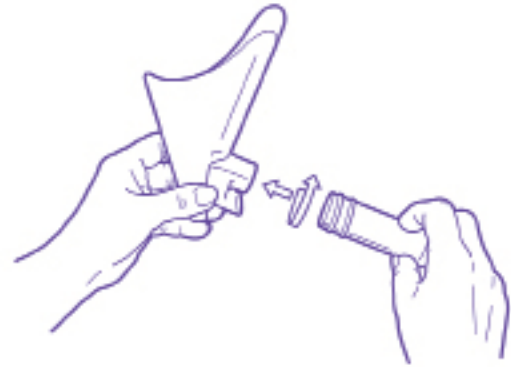

1. استخدمي ورقة المسح الصحية لتتظفي نفسك قبل تقديم عينة البول. اخلعي غطاء الزجاجاة وركبيها بالبرم على المزراب الأكبر حجماً الخاص بـ "بيزي". لا تحكمي البرم بشدة.

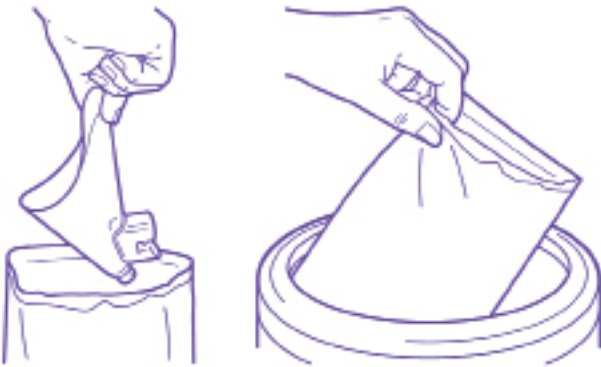

4. تخلصي من "بيزي" في حاوية التخلص من النفايات الموفرة لذلك الغرض.



3. امسكي بالزجاجاة في وضع عمودي لكي تفصلها عن "بيزي" ثم ضعي الغطاء عليها مرة أخرى.

زجاجاة جافة، مرحاض جاف وجفاف لك بفضل أخذ العينة في وسط السيل

كيف يعمل نظام "بيزي" لتجميع البول بشكل صحيح من أول مرة في وسط السيل؟

يوجد بقمع "بيزي" قناة خاصة تتركب فيها الحاوية القياسية الملائمة لأغراض متعددة والتي يوجد نحتها مخرج لتدفق البول الزائد عن السعة، ليست هناك حاجة لكي تشغلي فكرتك بأي شيء غير إطلاق البول.



لمن يصلح استعمال "بيزي"؟

إن "بيزي" يصلح لكل امرأة، حيث تم تصميم الجهاز ببراعة ليناسب أي منطقة عجان أنثوية بصورة مريحة بغض النظر عن الحجم أو الوزن أو السن.

كما يناسب تماما استخدام الأطفال وكبار السن والمرضى الذين يعانون من معوقات تعليمية. إن المختص بالرعاية يمكنه أن يمسك بالحاوية لتثبيت وضع "بيزي" في المكان الصحيح. وهنا من شأنه أن يزيل خطر الملامسة غير المرغوب فيها أو حاجة المريض للإعلان عن بداية تسريب وتدفق البول حيث يمكن للشخص التبول عند الاستعداد لتلك ويقوم "بيزي" بعمل الباقي.

نظام "بيزي" نظيف وصحي يترك اليدين جافة والزجاجة جافة والمرحاض جاف والأرضية جافة.

الخطوة الأولى: البدء

- استخدمى ورقة المسح الصحية لتنظفي منطقة العجان
- ركبي الحاوية الملائمة لأغراض متعددة بربما على المزراب الأكبر حجماً الموجود عند مقبض "بيزي"
- ضعي "بيزي" بملاصقة جسديك
- اجلسي بصورة جيدة على مقعد المراض وأطلقى البول ببساطة - "بيزي" سيؤم بإبقي
- ستسمعين صوت تثار وترشاة "أول دفعة" التي تتوجه إلى الأسفجة المضغوطة الموجودة عند قاعدة مزراب "بيزي"
- عندما يلامسها البول، تتمدد هذه الإسفجة لتوقف التدفق
- بعد ذلك يرتفع منسوب البول ويتم توصيل "المعيار الذهبي" الخاص للبول المأخوذ من وسط السيل إلى الحاوية
- عند امتلاء الزجاجة يتم توصيل البول الزائد عن طريق مزراب التسريب إلى قلب المراض. ولا يمكن للبول أن يرد إلى المزراب الذي لا يقبض بسرطان البول العادي

الخطوة الثانية: الإنتهاء

- عدي من واحد إلى 20 للتأكد من نزوح البول عن الإسفجة
 - ارفعي "بيزي" بعيداً عن جسديك واسكي بالحاوية في وضع عمودي
 - فكّي الحاوية من المزراب
 - اللي بجهاز "بيزي" في حاوية للتخلص من النفايات وضعي الغطاء على الزجاجة
- والآن تتوفر لديك عينة خلصمة من البول مأخوذة من وسط السيل للتحليل الطبي المواتي والتفريق.



نصائح هامة

إن إتباع تعليمات استخدام "بيزي" سيعطيك عينة دقيقة للبول مأخوذة في وسط السيل مما يساعد على تحديد المشكلة بدقة ووصف العلاج الصحيح.

1. لفي الزجاجة برفق لكي تتركب على جهاز "بيزي" في الوضع الصحيح
2. امسكي "بيزي" من الجزء الأمامي العلوي للمزراب وليس بالزجاجة لوضعها في المكان الملائم
3. لفي الزجاجة لتكها وهي في وضع عمودي ثم ضعي عليها الغطاء

تم تصميم نظام "بيزي" وصناعته في المملكة المتحدة بمعرفة شركة "فاتالي اينفان ليمتد"، ذي اولد فاير ستيشان، 140 تابرناكل ستريت، لندن اي سي 2 إيه 4 اس دي للحصول على مزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت www.forte-medical.com