




Udana za pierwszym razem próbka
moczu ze środkowego strumienia,
badanie, diagnoza i leczenie

Łatwy w użyciu w czterech prostych krokach!


Podczas korzystania z Peezy, usłyszysz uchodzący do toalety mocz. Jest to sytuacja prawidłowa.

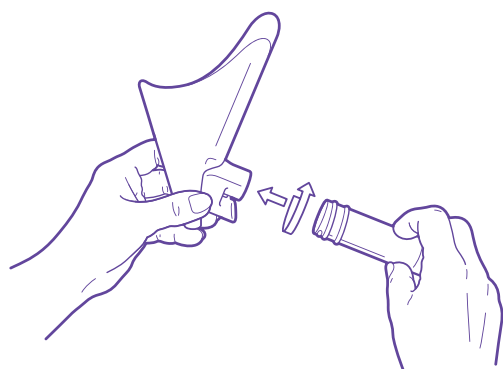


1. Przed oddaniem próbki moczu przemyj się używając nawilżonej chusteczki higienicznej. Zdejmij wieczko i nakręć butelkę na większą końcówkę Peezy. Nie dokręcaj jej zbyt mocno.



2. Umieść Peezy przy ciele i wygodnie usiądź nad toaletą. Opróżnij pęcherz w zwykły sposób; w czasie działania Peezy usłyszysz uchodzący do toalety mocz. Po skończeniu policz do 20, aby Peezy został całkowicie osuszony.

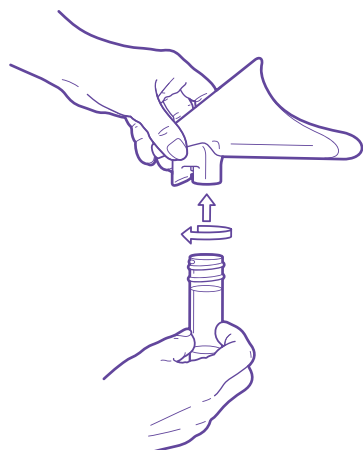

3. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, odkręć ją od Peezy i ponownie umieść na niej wieczko.

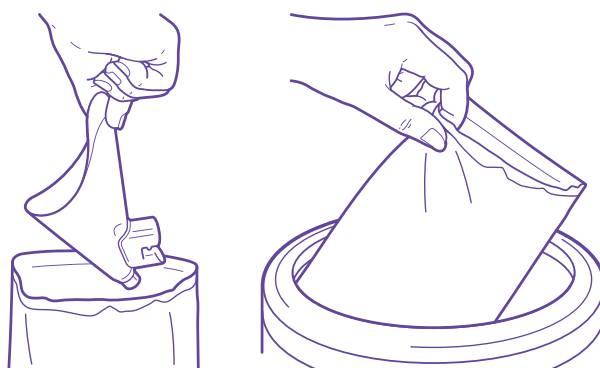

4. Wyrzuć Peezy do odpowiedniego pojemnika na odpady.

SUCHA BUTELKA, SUCHA TOALETA, SUCHA TY ORAZ UDANA PRÓBKA

Dla kogo przeznaczony jest Peezy?

Peezy przeznaczony jest dla każdej kobiety. Został on mądrze zaprojektowany i wygodnie dopasowuje się do krocza kobiety, bez względu na jej figurę, wagę i wiek.

Peezy nadaje się także do użytku przez dzieci, osoby starsze oraz pacjentów z trudnościami w nauce, ponieważ może on być przytrzymywany na miejscu przez opiekuna chwytającego za pojemnik. Eliminuje to ryzyko niepożądanego kontaktu oraz konieczność oznajmienia przez pacjentów momentu rozpoczęcia oddawania moczu; rozpoczynają oni, kiedy są gotowi, a Peezy robi resztę.

Jak działa Peezy – system przeznaczony do pobierania udanej za pierwszym razem próbki moczu?



Lejek Peezy posiada specjalny przewód, do którego pasują wszystkie standardowe pojemniki uniwersalne. Pod przewodem tym znajduje się ujście nadmiaru moczu. Nie musisz myśleć o niczym innym poza uwolnieniem strumienia moczu.

Peezy jest higieniczny i pozostawia suche ręce, suchą butelkę, suchą toaletę i suchą podłogę.

Krok 1: rozpoczęcie

- Przemyj krocz używając dołączonej chusteczki higienicznej
- Przykręć pojemnik uniwersalny do większej końcówki znajdującej się na przedniej części Peezy
- Umieść Peezy przy ciele
- Usiądź wygodnie nad toaletą i uwolnij strumień moczu – Peezy zrobi resztę
- Usłyszysz plusk „pierwszego tryśnięcia”, które omija skompresowaną gąbkę u podstawy lejka Peezy
- Przy kontakcie z moczem gąbka ta powiększa się, aby zatamować strumień
- Mocz wtedy podnosi się, dostarczając do pojemnika uniwersalnego czystą próbkę moczu ze środkowego strumienia
- Kiedy butelka jest pełna, nadmiar moczu odprowadzany jest do toalety poniżej poprzez przeznaczone do tego ujście
- Nie może on wrócić do lejka, który przy normalnym strumieniu nie przeleje się

Krok 2: zakończenie

- Policz do 20, aby upewnić się, że gąbka została odsączona
- Unieś Peezy z dala od ciała, trzymając go w pozycji pionowej
- Odkręć pojemnik
- Wyrzuć Peezy do pojemnika na odpady i umieść wieczko na butelce

Masz teraz czystą próbkę ze środkowego strumienia do szybkiego i dokładnego badania.



Wskazówki

1. Delikatnie przykręć butelkę do Peezy
2. Utrzymuj Peezy na miejscu chwytając za jego górną przednią część, nie za butelkę
3. Odkręć butelkę w pozycji pionowej i umieść na niej wieczko

Zastosowanie się do instrukcji Peezy sprawi, że twój lekarz otrzyma prawidłową próbkę moczu ze środkowego strumienia, co pomoże określić problem i ustalić właściwe leczenie.

Peezy został zaprojektowany i jest produkowany w Wielkiej Brytanii przez
Forte Medical Ltd, The Old Fire Station
140 Tabernacle Street, London EC2A 4SD
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową
www.forte-medical.com