




Получение чистой средней порции мочи с первого захода, Анализ, диагностика и лечение

Простота использования в четыре простых этапа!


Вы услышите как струя мочи вытекает в туалет во время использования Пизи. Это нормальное явление.

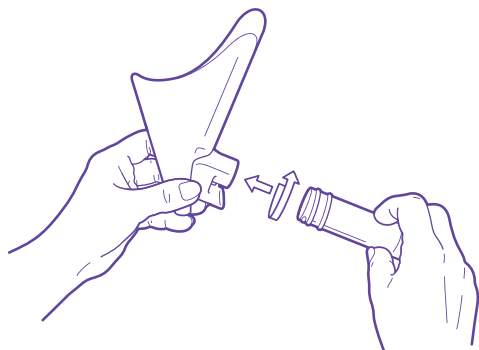


1. Используйте гигиенические влажные салфетки для очистки промежности перед забором мочи. Снимите крышку и **завинтите бутылку на горлышко** Пизи большего размера. Не завинчивайте слишком туго.



2. **Сидя ровно на унитазе расположите Пизи в непосредственной близости тела.** Опорожните содержимое мочевого пузыря как обычно; вы услышите как моча вытекает в унитаз во время функционирования Пизи. Когда закончите мочеиспускание, посчитайте до 20 для обеспечения полного опорожнения Пизи.

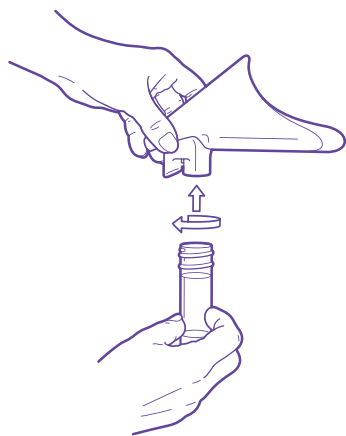

3. Вовремя отсоединения от Пизи, держите бутылку вертикально и затем закройте ее крышкой.

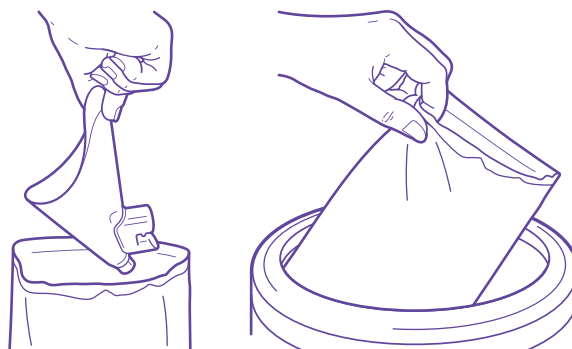

4. Выбросьте Пизи в предусмотренный мусорный бачок.

**СУХАЯ БУТЫЛКА, СУХОЙ ТУАЛЕТ, САМИ СУХИЕ,
ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПОРЦИИ МОЧИ**

Для кого предназначено Пизи?

Пизи подходит для любой женщины. Оно было талантливо разработано и удобно входит в промежность любой женщины независимо от размера тела, веса или возраста.

Пизи также рекомендуется для детей, пожилых или умственно отсталых больных, потому что вовремя использования, человек осуществляющий уход за больным может держать Пизи за контейнер. Это устраняет риск нежелательного контакта или необходимость для больного извещать о начале мочеиспускания; они просто опорожняют мочевой пузырь по необходимости и об остальном позаботиться Пизи.

Принцип работы Пизи - системы обеспечивающей получение чистой средней порции мочи с первого захода



Воронка Пизи имеет специальное горлышко, в которое устанавливается стандартный Универсальный Контейнер, непосредственно ниже находится сливное отверстие. Вам остается только начать процесс мочеиспускания.

Пизи отвечает гигиеническим требованиям, после его использования руки, бутылка, туалет и пол остаются сухими

Ступень первая: начальная

- Используйте влажные гигиенические салфетки для очистки промежности
- Завинтите Универсальный Контейнер в горлышко большего размера расположенное в передней части Пизи
- Расположите Пизи в непосредственной близости тела
- Сидя ровно на унитазе, начинайте естественный процесс мочеиспускания – об остальном позаботиться Пизи.
- Вы услышите всплеск начального мочеиспускания, когда моча устремляется в обход сжатой губки расположенной в основании воронки Пизи.
- При контакте с мочой, губка увеличивается в объеме и останавливает поток мочи
- Моча затем поднимается, доставляя чистую 'желтого цвета' среднюю порцию в 'Универсальный Контейнер',
- Как только бутылка полностью заполнена, излишек мочи отводится через сливное отверстие непосредственно в унитаз. Излишек не может вернуться в воронку, которая при обычном мочеиспускании не переполняется.

Ступень вторая: завершающая

- Посчитайте до 20 для обеспечения стекания излишней влаги с губки
- Держа контейнер вертикально поднимите Пизи на расстояние от вашего тела
- Отвинтите контейнер
- Выбросите Пизи в мусорный бачок и закройте бутылку крышкой

Вы получили среднюю порцию мочи для быстрого и точного медицинского анализа.



Основные советы

1. Осторожно завинтите бутылку в указанном месте на Пизи
2. Держите Пизи в верхней передней части воронки, а не за бутылку
3. Открутите бутылку вертикально и закройте ее крышкой

Соблюдение инструкций обращения с Пизи обеспечит вашего врача точным анализом средней порции мочи, что в последствии поможет установить диагноз и назначить правильное лечение.

Пизи было разработано и произведено в Соединенном Королевстве фирмой
Forte Medical, The Old Fire Station
140 Tabernacle Street, London EC2A 4SD

За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.forte-medical.com